

規格

フェイスルPEGキット(鮎田式胃壁固定具II付)

医療機器承認番号 23100BZX00083000

品目コード	サイズ呼称	有効長	JANコード
800 001 5946	20Fr L-15	15mm	4542187216097
800 001 5947	20Fr L-20	20mm	4542187216103
800 001 5948	20Fr L-25	25mm	4542187216110
800 001 5949	20Fr L-30	30mm	4542187216127
800 001 5950	20Fr L-35	35mm	4542187216134
800 001 5951	20Fr L-40	40mm	4542187216141
800 001 5952	20Fr L-45	45mm	4542187216158
800 001 5953	20Fr L-50	50mm	4542187216165

1キット/箱・滅菌済

付属品

名称	仕様	数量
接続チューブ(持続投与タイプ)	有効長 300mm	1本
接続チューブ(ボラス投与タイプ)	有効長 300mm	1本
接続チューブ(ボラス投与タイプ)(ショート)	有効長 50mm	1本
ガイドワイヤー	・外径 1.32mm (0.052") ・固定式ストレート(先端軟化型) ・全長 600mm ・100mm 間隔のデプスマーク	1本
オブチュレーター	—	1本
金属グリップ	—	1個
スペーサー	—	3個
潤滑ゼリー	—	1袋
胃壁固定具II	・全長 230mm ・穿刺針外径 20G (0.9mm) ・穿刺針有効長 81mm ・内径 (0.64mm) ・ロッド	1個
ワンステップダイレーター	・外径 9.0mm (27Fr) ・有効長 143mm	1個
処置キット(PEG造設用)	—	1キット

処置キット(PEG造設用)

名称	仕様	数量
シリンジ	10mL 中口	1本
注射針	18G×1・1/2 RB ピンク	1本
ディスプレイ針	23G×70mm 目盛付き	1本
スカルペル	No.11	1本
モスキート	曲 12.5cm	1本
ガーゼ(Yカット)	7.5cm×7.5cm 12ply Yカット	5枚
不織布ガーゼ	30cm×30cm 8ツ折り	5枚
消毒用スポンジ	8inch (200mm) オレンジ	2個
穴明ラミオイフ	900mm×900mm Φ90	1枚
消毒用カップ	80mm×80mm×39mm 150mL	1個
ナイロン縫合糸	2-0 40cm×5本入	1袋
トレー	5.4inch×9.7inch×2.1inch 青	1枚

単品販売

フェイスル オブチュレーター



品目コード	JANコード
800 001 5673	4542187213355

医療機器届出番号 14B1X00007000024 1本/箱・滅菌済

フェイスルボタン(接続チューブ)



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
サイズ呼称	有効長	品目コード	JANコード
ボラス投与タイプ	300mm	800 001 6483	4542187221480
ボラス投与タイプ(ショート)	50mm	800 001 6484	4542187221497
持続投与タイプ	300mm	800 001 6485	4542187221503

医療機器承認番号 23000BZX00375000 1本/箱・滅菌済

- 弊社では常に研究開発をおこなっておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
- ご使用にあたっては、必ず電子添文をご一読ください。

 **クリエートメディック株式会社**
CREATE MEDIC

本社 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25
ホームページ <https://www.createmedic.co.jp>



フェイスルPEGキット

(鮎田式胃壁固定具II付)

ISO 80369-3 対応

医療機器承認番号 23100BZX00083000



 **CREATE MEDIC CO.,LTD.**
CREATE MEDIC

One-step dilation

ユースフレーター(ワンステップダイレーター)は、今まで煩雑だった針の穿刺からダイレーションまでのステップを簡略化しました。更にダイレーションの過程で穿刺針(16G)と細径ダイレーター(10Fr)をダイレーター(27Fr)内に収納することで胃後壁誤穿刺のリスクを低減します。

イントロデューサー変法PEGキット

ユースフレーター (ワンステップダイレーター)



ロッドを押すことで穿刺針及び細径ダイレーター(10Fr)を突出させ、穿刺を開始する。



内視鏡下で胃内に細径ダイレーター(10Fr)が確認されたら、「解除ボタン①」を押すことで穿刺針が細径ダイレーター内に収納される。



更に本体を胃内に押し進め、内視鏡下でダイレーター(27Fr)が確認されたら、「解除ボタン②」を押すことで細径ダイレーター(10Fr)がダイレーター内に収納される。



オブチュレーター

安定した挿入性を実現

- ◆ 付属のオブチュレーターとコシのある0.052"ガイドワイヤーにより、直進性を高め安定した挿入性を実現しています。

ボタン・バンパー型カテーテル

- ◆ 保持力のあるウィング型胃内バンパーでしっかりと固定します
- ◆ 見やすいサイズ表示
- ◆ 有効長 1.5cm~5.0cmまでの豊富なサイズラインナップを取り揃えています。



接続チューブ (ISO 80369-3 対応)

- ◆ チューブ内腔を広くした設計になっており栄養剤等の流量を確保します。
- ◆ “ボラス投与タイプ(ショート)”は有効長が50mmと短いため半固形栄養剤の投与に適しています。



付属品

胃壁固定具II



片手で操作可能な“胃壁固定具II”が付属されています。

処置キット(PEG造設用)



胃瘻造設に必要な処置キットが付属されています。