

経皮的瘻用 カテーテルキット

(鮎田式胃壁固定具Ⅱ付)

医療機器承認番号 20100BZZ00011000



胃壁固定具Ⅱがセットになりました。



進化した鮎田式胃壁固定具

一連の操作が片手でできるようになりました。

片手での操作が可能となり、縫合糸を胃内に送り込む際に手元を見る必要がありません。これにより、内視鏡画像を見ながらの操作が可能になりました。



1
糸把持用
ループの形成

糸送りローラー


縫合糸を胃内に挿入する際に使用します。(順・逆操作が可能)
ローラーを矢印の方向に回すだけで縫合糸を胃内に送り込むことができます。



2
縫合糸の挿入

ループ挿入ロッド

胃内で糸把持用ループを形成する際に使用します。ループ挿入ロッドを押すと糸把持用ループが形成されます。

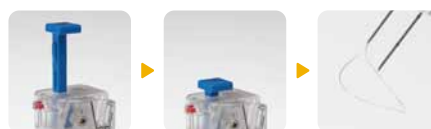

3
縫合糸の把持

解除ボタン

縫合糸を把持する際に使用します。
解除ボタンを押すだけで縫合糸を把持することができます。



Introducer法

introducer法はカテーテル通過による食道損傷や咽頭菌による瘻孔への感染の危険性が少ない手法です。内視鏡操作が一度で済み、短時間でPEGを施行できます。



デプスマーク

表示が新しくなり、PEG11-II・PEG13-IIにもデプスマークを追加しました。



刺入しやすいPS針

シースと密着したPS針は先端部に段差のないテーバー加工で、穿刺の確実性を高めます。



まっすぐ裂ける造影性シース

左右に引っ張るとシースが裂け、きれいに取り去ることが可能です。

キット内容

PEG11-II・PEG13-II



- ① 胃瘻用カテーテル^{※1}
- ② 固定用タイ
- ③ 固定板
- ④ 胃壁固定具II
- ⑤ PS針シース付き
- ⑥ 滅菌済みナイロン^{※2} (2-0 縫合糸)

PEG15-II



- ① 胃瘻用カテーテル^{※1}
- ② 胃壁固定具II
- ③ PS針シース付き
- ④ 滅菌済みナイロン^{※2} (2-0 縫合糸)

品目コード	サイズ呼称	カテーテルサイズ	カテーテル全長	規定容量	JANコード
8000011567	PEG11-II	11Fr (3.7mm)	280mm	3mL	4542187172287
8000011568	PEG13-II	13Fr (4.3mm)	280mm	4mL	4542187172294
8000011569	PEG15-II	15Fr (5.0mm)	280mm	3mL	4542187172300

※1 カテーテル仕様 (PEG11-II・13-II・15-IIとも共通です)
 ・X線造影ライン ・バルーン後端から20mm～160mmまで10mm間隔のデプスマーク ・先端開孔型 ・側孔2孔

※2 滅菌済みナイロン (PEG11-II・13-II・15-IIとも共通です) 製造販売元: 松田医科工業株式会社
 ・規格: 青ナイロン 2-0 縫合糸(5本) ・医療機器承認番号: 20200BZZ01362000

1キット/箱・EOG滅菌済

単品販売 胃壁固定具II



■製品仕様
 販売名: 胃壁固定具II
 医療機器承認番号: 22100BZX00268000

■付属器具
 販売名: 滅菌済みナイロン
 規格: 青ナイロン・2-0縫合糸(5本)
 医療機器承認番号: 20200BZZ01362000
 ※製造販売元: 松田医科工業株式会社

品目コード	穿刺針外径	穿刺針有効長	全長	JANコード
8000009923	20G(0.9mm)	81mm	230mm	4542187167825

1本/箱・EOG滅菌済

□ 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。

□ ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。



本社 横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-5-25
 ホームページ <http://www.createmedic.co.jp>

- | | | |
|---|--|---|
| 札幌営業所 TEL: 011(727)5611 FAX: 011(727)8990 | 盛岡出張所 TEL: 019(606)1020 FAX: 019(606)1022 | 仙台営業所 TEL: 022(234)2541 FAX: 022(234)2530 |
| さいたま営業所 TEL: 048(640)6161 FAX: 048(640)6162 | 東京営業所 TEL: 03(3815)7861 FAX: 03(3815)7943 | 千葉出張所 TEL: 04(7141)2945 FAX: 04(7141)2946 |
| 横浜営業所 TEL: 045(943)2617 FAX: 045(943)2618 | 名古屋営業所 TEL: 052(238)5670 FAX: 052(241)5033 | 金沢出張所 TEL: 076(260)1085 FAX: 076(260)1086 |
| 大阪営業所 TEL: 06(6944)0401 FAX: 06(6944)0400 | 広島営業所 TEL: 082(261)5401 FAX: 082(261)5402 | 福岡営業所 TEL: 092(474)9911 FAX: 092(474)9912 |
| 鹿児島出張所 TEL: 099(250)6391 FAX: 099(250)6392 | | |