

ティアレ 大型動物用留置針

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。
- ・再穿刺禁止。
[適切に穿刺できない恐れがある。]
- ・カテーテルから内針を抜き取る際は、内針を途中で止めないこと。また、カテーテル内で内針を針先方向に進めないこと。
[カテーテル内壁が損傷し、カテーテルの破断、漏液・漏血を生じる恐れがある。]

【形状・構造及び原理等】

- ・本品はエチレンオキシドガス滅菌済である。
- ・本品は金属を使用している。

〈形状〉

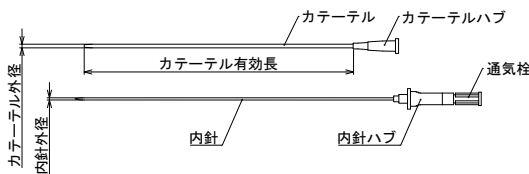

サイズ呼称	カテーテル		内針
	外径	有効長	外径
14G×83mm	2.1mm	83mm	1.6mm
14G×140mm		140mm	
16G×83mm	1.7mm	83mm	1.2mm
16G×140mm		140mm	

〈原材料〉

- ・カテーテル：FEP樹脂
- ・カテーテルハブ：PP、ステンレススチール
- ・内針：ステンレススチール
- ・内針ハブ：アクリル
- ・通気栓：ポリプロピレン

〈原理〉

血管へ留置針を穿刺し、輸液セットや輸血セット等と接続することができる。

【使用目的又は効果】

本品は、輸液等の動脈留置用として使用する留置針である。

【使用方法等】

以下の使用方法は一般的な使用方法である。

- ①穿刺部位及びその周囲の皮膚を、消毒剤（ポビドンヨード等）を用いて、十分に消毒する。
- ②内針の刃面が上になるように内針針基を保持して血管へ穿刺する。
- ③内針針基への血液流入により、内針先端が血管に入ったことを確認し、更にカテーテル部へ血液が流入し、カテーテル先端が血管に入ったことを確認する。

- ④止血をしながら内針を抜去する。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

次の事項を遵守しない場合は、カテーテルが破損する、又は接続部が外れる、カテーテルが血管から抜ける可能性がある。

- ①カテーテルに内針を再挿入して使用しないこと。
- ②屈曲部位にカテーテルを留置して使用しないこと。
- ③カテーテルを鉗子等でつまんだり、爪でつぶしたりしないこと。
- ④カテーテルの近くでハサミ、メス等の鋭利な物を使わないこと。
- ⑤カテーテル及びカテーテルと接続している箇所は、無理に引っ張るような負荷やカテーテルを押し込むような負荷、カテーテルを折り曲げるような負荷を与えないこと。
- ⑥カテーテルハブに対して輸液セットや輸血セット等のコネクターを接続する場合は、カテーテルハブを確実に把持した状態で接続を行うこと。

[カテーテルハブを把持しないで接続すると、カテーテルとカテーテルハブとの接着部に回転負荷がかかり、接着強度が低下して、カテーテルの脱落が発生する恐れがある。]

- ⑦輸液セットや輸血セット等のチューブをカテーテルハブへ接続して留置する場合、カテーテル・カテーテルハブならびに輸液セットや輸血セット等をテープ等で体表に固定しておくこと。

[輸液セットや輸血セットのチューブに過度な引張負荷がかかった場合、カテーテルハブから輸液セットや輸血セットのコネクターが脱落する恐れがある。]

- ⑧輸液セットや輸血セットのチューブをカテーテルハブへ接続して留置する場合、輸液セットや輸血セットのチューブに過度な引張負荷がかからないように管理すること。

[カテーテルがカテーテルハブから脱落する、あるいはカテーテルハブから輸液セットや輸血セットのコネクターが脱落する恐れがある。]

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ①カテーテル内が生体組織や血液が詰まる可能性があるため、穿刺する部位の状態について注意すること。

[硬化した外科手術痕に針を穿刺したとき、カテーテル内に生体組織が詰まる、あるいはカテーテル内で血液が凝固して詰まり、薬液注入ができなくなる恐れがある。]

- ②本品を鉗子等で強く掴まないこと。
- ③使用中は本品の破損、接合部の緩み及び漏れ等について、定期的に確認すること。
- ④本品のカテーテルハブ部、及び内針には金属を使用している。従ってMRI（磁気共鳴画像診断装置）による検査を行う場合は、画像にアーチファクトの発生や、局所高周波加熱が生じる可能性があるため注意すること。

〈不具合・有害事象〉

その他の不具合

過度な負荷による折れ、曲がり。

その他の有害事象

本品の使用により、以下のような有害事象が発症する恐れがある。

- ・薬液注入による骨髄抑制、消化器系潰瘍、動・静脈炎
- ・誤穿刺

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿、殺菌灯等の紫外線を避けて清潔に保管すること。

〈有効期間〉

適正な保管方法が保たれていた場合、個包装に記載の使用期限を参照のこと。

[自己認証（当社データ）による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

クリエートメディック株式会社

電話番号：0126-25-3777