



トラクトキープ


品目コード	タイプ	サイズ	長さ	カラーコード	JANコード
800-002-0171	72時間用 気管チューブ用	3.3mm (10Fr)	54cm	黒	4580096577014
800-002-0172		4.0mm (12Fr)		白	4580096577021
800-002-0173		4.7mm (14Fr)		緑	4580096577038
800-002-0174	72時間用 気管切開チューブ用	3.3mm (10Fr)	30cm	黒	4580096577045
800-002-0175		4.0mm (12Fr)		白	4580096577052
800-002-0176		4.7mm (14Fr)		緑	4580096577069

販売名:トラクトキープ 医療機器認証番号:306AIBZX00005000
付属品:曜日シール、フレックスコネクタ

包装:20本/箱・滅菌済

洗浄用滅菌食塩水15mL

品目コード	規格	JANコード
800-002-0177	気管支等吸引用カテーテル専用洗浄液 洗浄用滅菌食塩水15mL	4542187241556

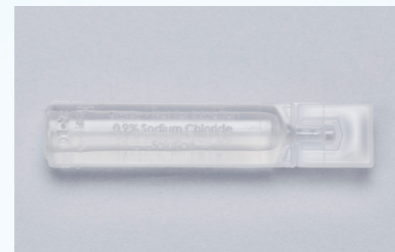



雑品


包装:144個/箱・滅菌済

Tract Keep


閉鎖型サクシオンカテーテル | トラクトキープ

製造販売元:  Daiichi Sankyo Company, Ltd. (Japan)

製造業者:  Symphon Medical Technology Co., Ltd. (Taiwan)

お問い合わせ先:  Create More Corporation

カテーテルを挿入するだけで開く十字弁を採用、簡便な気管吸引をアシストします。

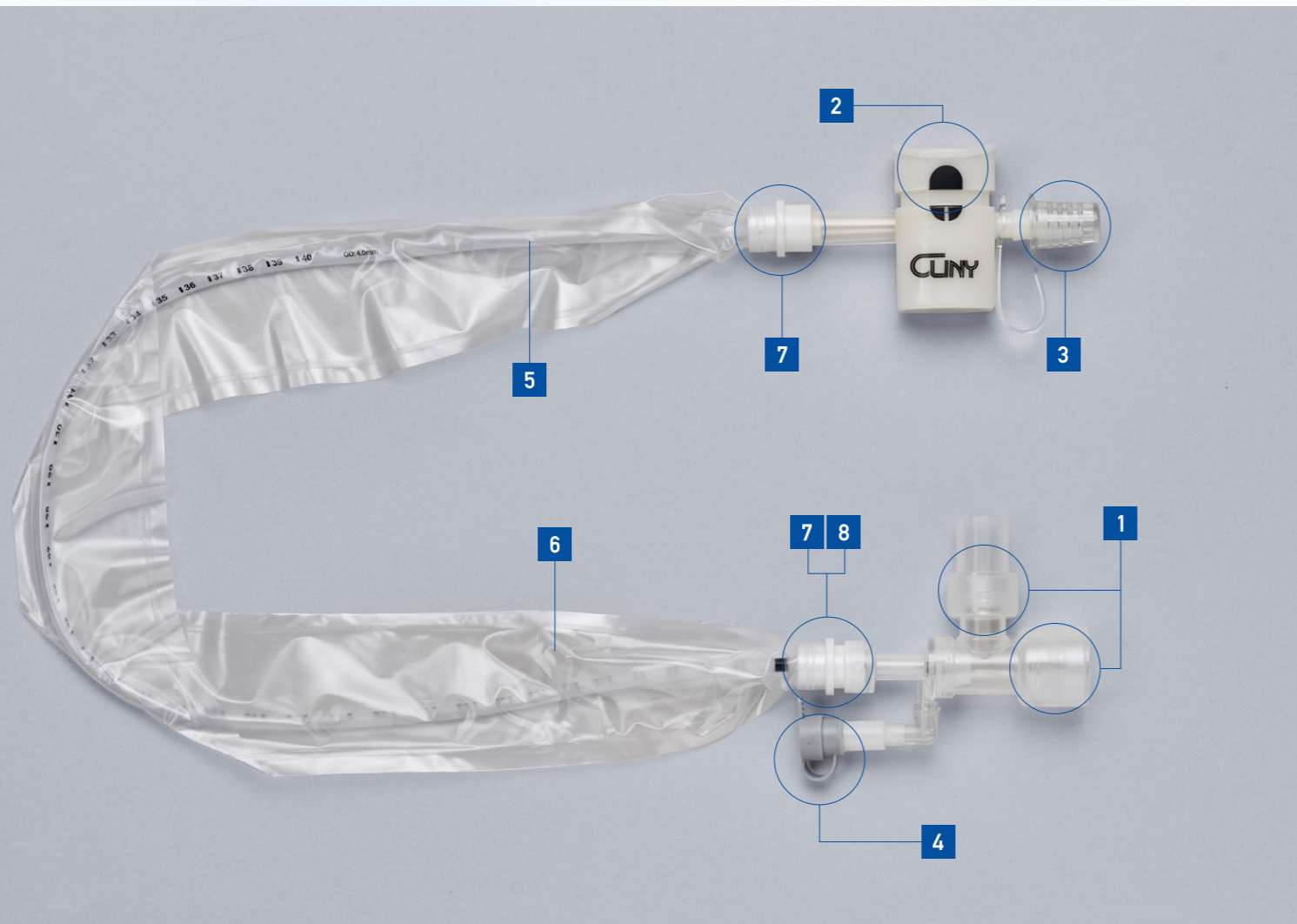

1 ダブルスイベルコネクタ

回転するダブルスイベルコネクタが呼吸器回路のねじれを軽減します。

3 キャップ

紛失予防のためのストラップ付。

5 カテーテル

6 スリーブ

2 コントロールバルブ

意図しない吸引を防止するため、バルブを引きながら180度回転させることでロックを解除することができます。

4 洗浄用ポート

一方弁がエアリークを防ぎます。

7 カラーコード

8 ピープシール

付属品

曜日シール

日本語で見やすい曜日シールは、一目で交換曜日を把握できます。




フレックスコネクタ



十字弁

カテーテル洗浄時に、十字弁が回路を閉鎖することによって換気量への影響を抑え、より安全で効果的な洗浄を実現します。

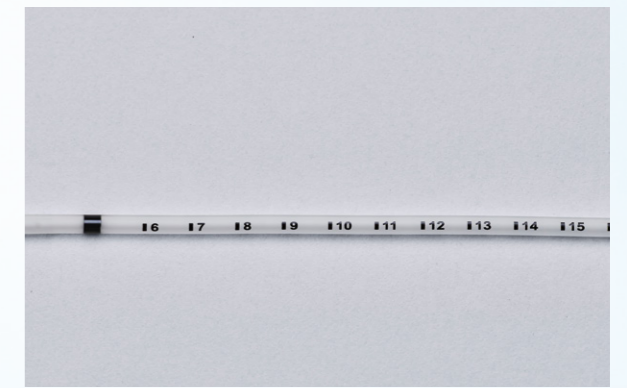

深度マーク

カテーテル深度マークを1cm毎に配置しているため、細かく挿入深度を把握できます。

ロック中



コントロールバルブ


色を付けていますので、一目でロック状態を把握できます。

ロック解除




先端マーカー

先端と先端から5cmに全周性のマーカーを付与しております。

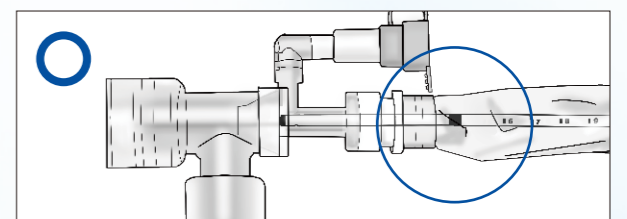

先端から5cmのマーカーがスリーブ内に戻ってきたら引き戻しながらの吸引を止めてください。先端のマーカーは少し見える位置に留めてください。

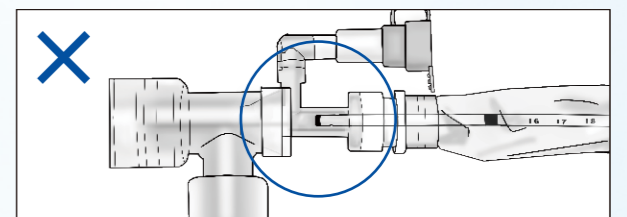

先端のマーカーがはっきり見えるようだと引きすぎです。