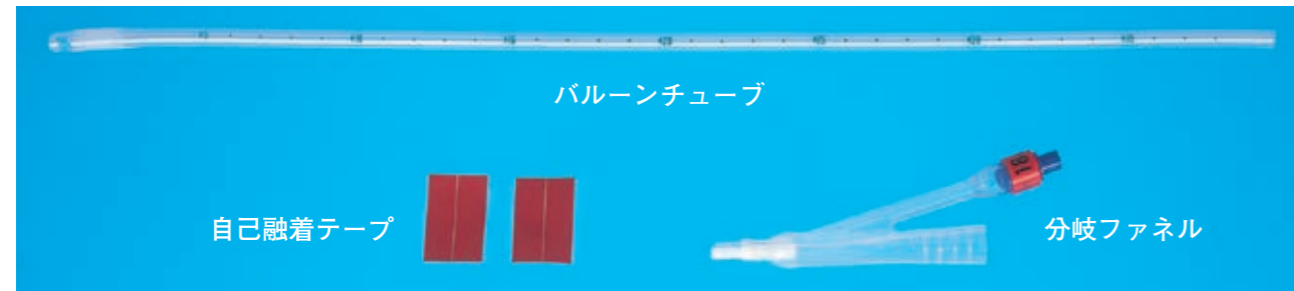


リムーバブルファネルカテーテル(腎盂タイプ) 医療機器承認番号 16100BZZ01757000



リムーバブルファネルカテーテル(腎盂タイプ)は、幾多の臨床例に使用されることによって磨き抜かれた腎盂バルーンカテーテルの品質に“必要な時に分岐ファネルを脱着することができるという新しい機能”を付与したもので、経皮的腎尿管切石術(PNL)や観血的な腎瘻造設術における腎盂内留置カテーテルとして安全性が高く使いやすい製品です。



特長と利点

1. 脱着可能な分岐ファネル

ファネルを付けない状態で挿入できるので硬性鏡外套を容易に抜去できます。結石の一次的摘出のみならず二次的摘出に便利です。

2. 挿入しやすいバルーンチューブ

バルーンとシャフトの段差が少ないので、硬性鏡外套の内腔を無理なく通過します。

3. 堅牢なプラスチックコネクタ

バルーンチューブと分岐ファネルとはプラスチックコネクタで隙間なく接続でき、尿もれの心配がほとんどありません。

4. 接続部を補強する自己融着テープ

付属の自己融着テープを巻くことによって、逸脱やコネクタ周辺部のキックを防げます。

5. デブスマーク(目盛)と造影ライン

挿入や交換が安全に行え、留置状態の確認も容易です。

リムーバブルファネルカテーテル(腎盂タイプ)

品目コード	サイズ 呼称	シャフト外径 (mm)	バルーン外径 (mm)	バルーン容量 (mL)	JANコード
001 340 0120	12Fr	4.0	5.0	2	4542187003215
001 340 0140	14Fr	4.7	5.7	3	4542187003222
001 340 0160	16Fr	5.3	6.3	5	4542187003239
001 340 0180	18Fr	6.0	7.0		4542187003246
001 340 0200	20Fr	6.7	7.7		4542187003253
001 340 0220	22Fr	7.3	8.3		4542187003260

ホワイテ造影ライン入

包装: 5本/箱・滅菌済

使用上の注意

- ①バルーンチューブをカットする場合は、コネクタ部でチューブが曲がらぬように長さを調節して下さい。
- ②バルーンチューブのカット面はなるべく垂直になるようにカットして下さい。
- ③自己融着テープをはがす時は、手でゆっくりとはがして下さい。
- ④バルーンには滅菌蒸留水を注入して下さい。
- ⑤使用前に必ず硬性鏡外套の内径を調べてから、使用するカテーテルのサイズを決定して下さい。

- 当社は常に研究開発を行っておりますので、予告なく製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。
- ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読下さい。



本社 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25
ホームページ <http://www.createmedic.co.jp>



腎盂バルーンカテーテル

医療機器認証番号 20100BZZ00191000

腎盂バルーンカテーテル・腎盂バルーンカテーテル(Fタイプ)



Nephrostomy Balloon Catheter



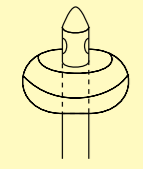
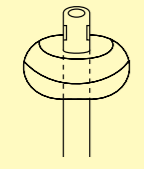
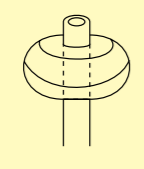
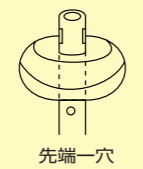
CREATE MEDIC CO.,LTD.

腎盂バルーンカテーテル

医療機器認証番号 20100BZZ00191000



豊富な先端部の種類・サイズ等から症例に応じて最適なものを選択できるクリニー
腎盂バルーンカテーテルは業界に先駆け発売して以来、シリコンの特性を生かした
確かな性能と高い品質により信頼をいただいています。

Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	B+2穴
			
先端造影 側孔二穴	先端一穴 側孔二穴	先端一穴	先端一穴 側孔二穴 バルーン後方 に小孔2穴
サイズ呼称	チューブ	先端タイプ	全長
GAM	G グリーン	Aタイプ	M340mm
GBM	G グリーン	Bタイプ	M340mm
GCM	G グリーン	Cタイプ	M340mm
WBS	W 透明	Bタイプ	S240mm
WBM	W 透明	Bタイプ	M340mm
WBL	W 透明	Bタイプ	L430mm
WBL+2	W 透明	B+2穴	L430mm

特長と利点

1. 豊富な種類

種類が豊富にあるので、症例に応じて最適なものが選択できます。また、先端部が短く、腎盂内で余分なスペースを取らず効率的な排尿ができます。

2. 偏平バルーン

特殊成型の偏平バルーンにより僅かなスペースで留置・固定ができ、尿の漏れがほとんどありません。

3. オールシリコン製

オールシリコン製なので尿道粘膜への刺激が少なく、尿成分の付着が低減されます。

4. デプスマーク付き

チューブに施されているデプスマーク（深度目盛）は見やすく、挿入や交換時に便利です。

腎盂バルーンカテーテル（グリーン）

グリーン造影ライン入
包装：10本/箱・滅菌済

品目コード	サイズ呼称	バルーン容量	バルブカラー	JANコード
001 060 0140	14FrGAM	3mL	グリーン	4542187000924
001 060 0160	16FrGAM	5mL	ブラウン	4542187000931
001 060 0180	18FrGAM	5mL	レッド	4542187000948
001 060 0200	20FrGAM	5mL	イエロー	4542187000955

デプスマーク・先端から5～25cmまで1cm間隔

品目コード	サイズ呼称	バルーン容量	バルブカラー	JANコード
001 061 0080	8FrGBM	1mL	レッド	4542187000979
001 061 0100	10FrGBM	1.5mL	イエロー	4542187000986
001 061 0120	12FrGBM	2mL	ホワイト	4542187000993
001 061 0140	14FrGBM	3mL	グリーン	4542187001006
001 061 0160	16FrGBM	5mL	オレンジ	4542187001013
001 061 0180	18FrGBM		レッド	4542187001020
001 061 0200	20FrGBM	イエロー	4542187001037	
001 061 0220	22FrGBM	バイオレット	4542187001044	
001 061 0240	24FrGBM	ブルー	4542187001051	

デプスマーク・先端から5～25cmまで1cm間隔

品目コード	サイズ呼称	バルーン容量	バルブカラー	JANコード
001 063 0100	10FrGCM	1.5mL	イエロー	4542187001075
001 063 0120	12FrGCM	2mL	ホワイト	4542187001082
001 063 0140	14FrGCM	3mL	グリーン	4542187001099
001 063 0160	16FrGCM	5mL	ブラウン	4542187001105

デプスマーク・先端から5～25cmまで1cm間隔

※は軽量化されたタイプとなっております。

●は受注生産品です。

腎盂バルーンカテーテル（透明）

ホワイト造影ライン入
包装：10本/箱・滅菌済

品目コード	サイズ呼称	バルーン容量	バルブカラー	JANコード
001 070 0080	8FrWBS	1mL	レッド	4542187001242
001 070 0100	10FrWBS	1.5mL	イエロー	4542187001259
001 070 0120	12FrWBS	2mL	ホワイト	4542187001266
001 070 0140	14FrWBS	3mL	グリーン	4542187001273
001 070 0160	16FrWBS	5mL	ブラウン	4542187001280
001 070 0180	18FrWBS		レッド	4542187001297
001 070 0200	20FrWBS	イエロー	4542187001303	

デプスマーク・先端から5～15cmまで1cm間隔

品目コード	サイズ呼称	バルーン容量	バルブカラー	JANコード
001 072 0080	8FrWBM	1mL	レッド	4542187001327
001 072 0100	10FrWBM	1.5mL	イエロー	4542187001334
001 072 0120	12FrWBM	2mL	ホワイト	4542187001341
001 072 0140	14FrWBM	3mL	グリーン	4542187001358
001 072 0160	16FrWBM	5mL	オレンジ	4542187001365
001 072 0180	18FrWBM		レッド	4242187001372
001 072 0200	20FrWBM	イエロー	4542187001389	
001 072 0220	22FrWBM	バイオレット	4542187001396	
001 072 0240	24FrWBM	ブルー	4542187001402	

デプスマーク・先端から5～25cmまで1cm間隔

品目コード	サイズ呼称	バルーン容量	バルブカラー	JANコード
001 074 0080	8FrWBL	1mL	レッド	4542187001419
001 074 0100	10FrWBL	1.5mL	イエロー	4542187001426
001 074 0120	12FrWBL	2mL	ホワイト	4542187001433
001 074 0140	14FrWBL	3mL	グリーン	4542187001440
001 074 0160	16FrWBL	5mL	オレンジ	4542187001457
001 074 0180	18FrWBL		レッド	4542187001464
001 074 0200	20FrWBL	イエロー	4542187001471	
001 074 0220	22FrWBL	バイオレット	4542187001488	
001 074 0240	24FrWBL	ブルー	4542187001495	

デプスマーク・先端から5～34cmまで1cm間隔

品目コード	サイズ呼称	バルーン容量	バルブカラー	JANコード
001 075 0100	10FrWBL+2	1.5mL	イエロー	4542187001518
001 075 0120	12FrWBL+2	2mL	ホワイト	4542187001525
001 075 0140	14FrWBL+2	3mL	グリーン	4542187001532
001 075 0160	16FrWBL+2	5mL	ブラウン	4542187001549
001 075 0180	18FrWBL+2		レッド	4542187001556
001 075 0200	20FrWBL+2	イエロー	4542187001563	
001 075 0220	22FrWBL+2	バイオレット	4542187001570	
●001 075 0240	24FrWBL+2	ブルー	4542187001587	

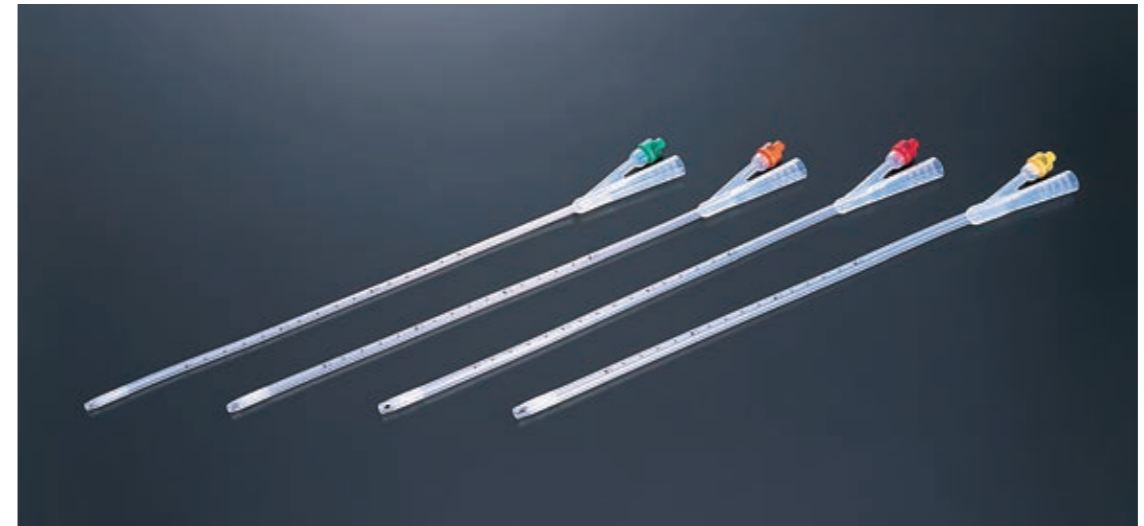
デプスマーク・先端から5～34cmまで1cm間隔

腎盂バルーンカテーテル（Fタイプ）

医療機器認証番号 20100BZZ00191000



多様化するニーズにお応えすべく開発された、バルーン部段差がほとんどない
フラットバルーンタイプの腎盂バルーンカテーテルです。



バルーン部



特長と利点

1. フラットタイプ

バルーン部はフラットタイプなので段差がほとんどなく、挿入・操作がスムーズに行えます。

2. 偏平バルーン

特殊成型の偏平バルーンにより僅かなスペースで留置・固定ができ、尿の流出がほとんどありません。

3. オールシリコン製

オールシリコン製なので尿道粘膜への刺激が少なく、尿成分の付着が低減されます。

4. デプスマーク付き

チューブに施されているデプスマーク（深度目盛）は見やすく、挿入や交換時に便利です。

※腎盂バルーンカテーテル（Fタイプ）

全長 340mm

品目コード	サイズ呼称	バルーン容量	バルブカラー	デプスマーク	側孔	JANコード
001 066 0080	8FrF	1mL	レッド	先端から 5～20cmまでに 1cm間隔 のドット	先端開孔 側孔二穴	4542187001150
001 066 0100	10FrF		イエロー			4542187001167
001 066 0120	12FrF	1.5mL	ホワイト			4542187001174
001 066 0140	14FrF	2mL	グリーン			4542187001181
001 066 0160	16FrF	3mL	オレンジ			4542187001198
001 066 0180	18FrF	5mL	レッド			4542187001204
001 066 0200	20FrF		イエロー	4542187001211		
001 066 0220	22FrF		バイオレット	4542187001228		
001 066 0240	24FrF		ブルー	4542187001235		

※は軽量化されたタイプとなっております。

ホワイト造影ライン入
包装：10本/箱・滅菌済