

TSK生検針シリーズ

# ワンカット

ワンハンド型自動生検針




**TSK**

# ワンカット ワンハンド型自動生検針


複雑な操作を必要とせず、シンプルかつ片手で簡単に生検を行います。

## ■特長

<b>片手で簡単操作!</b>	レバー1、2を手前にひくだけの簡単片手操作
<b>3種類のノッチ長</b>	様々な大きさの標本に対応可能な3種類のノッチ長、11mm、16mm、22mmを採用
<b>1段式</b>	内針・外針が同時に発射
<b>見やすいサイズ表記</b>	カラーコードに対応したサイズを本体表記
<b>軽量化に成功!</b>	わずか50gの重さ (当社従来の自動生検針より38%の軽量化に成功)

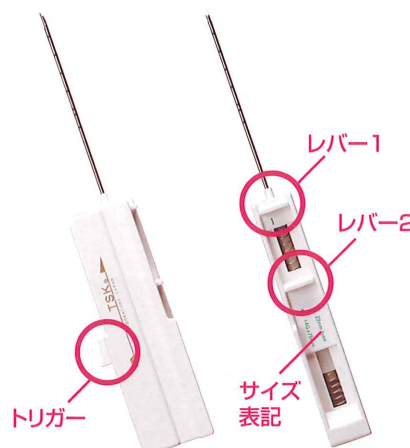

## ■使用方法 (ワン! トゥ! スリー! の簡単操作)

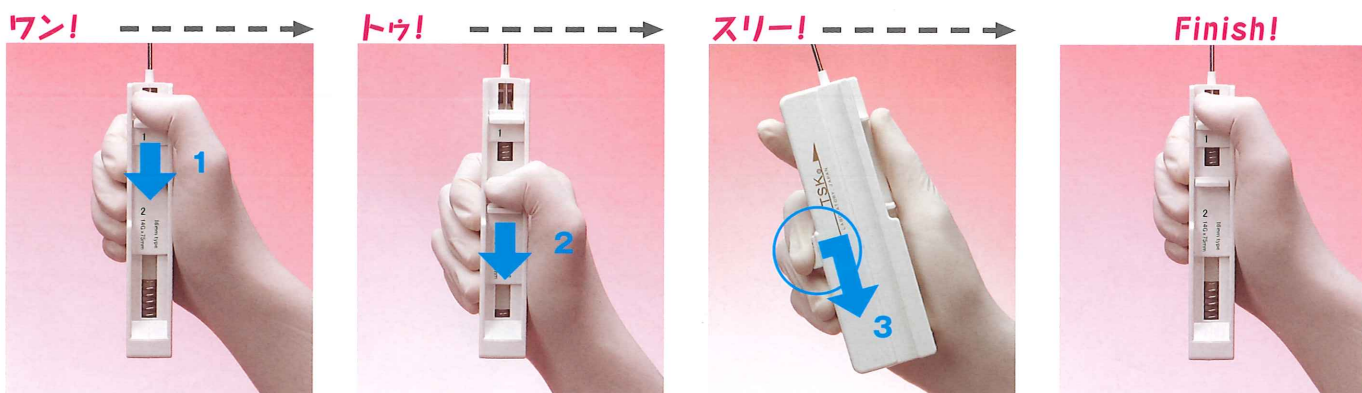

**[1]** レバー1を親指で下方方向に「カチッ」と音がするまで押し下げます。

**[2]** 続いて、レバー2を親指で下方方向に「カチッ」と音がするまで押し下げます。これで発射準備完了です。

**[3]** 目的部位に刺入し、本体真ん中にあるトリガーを上記矢印のように押し下げ発射。

**[注]** トリガーを、図のように押し下げませんと、内針、外針は発射されません。

**[4]** レバー1を引き下げ採取したサンプルを取り出します。

**[注]** 2回目以降の生検の際には、[2]からの動作で始まる為、連続した動作に対応しています。

■規格 販売名：ワンハンド型自動生検針(ワンカット) 医療機器認証番号：21600BZZ00517000 単回使用 クラス：II 管理医療機器

16mm 突出長				22mm 突出長			
太さ	有効長	品目コード	JANコード	太さ	有効長	品目コード	JANコード
14G	75mm	ONE-140753	4571225302591	14G	75mm	ONE-140752	4571225302454
	150mm	※ ONE-141503	4571225302607		150mm	ONE-141502	4571225302478
	200mm	※ ONE-142003	4571225302614		200mm	※ ONE-142002	4571225302485
16G	75mm	ONE-160753	4571225302621	16G	75mm	ONE-160752	4571225302492
	150mm	ONE-161503	4571225302638		150mm	ONE-161502	4571225302508
	200mm	※ ONE-162003	4571225302645		200mm	ONE-162002	4571225302515
18G	75mm	ONE-180753	4571225302652	18G	75mm	ONE-180752	4571225302522
	150mm	ONE-181503	4571225302669		150mm	ONE-181502	4571225302539
	200mm	ONE-182003	4571225302676		200mm	ONE-182002	4571225302546
20G	75mm	※ ONE-200753	4571225302683	20G	75mm	※ ONE-200752	4571225302553
	150mm	※ ONE-201503	4571225302690		150mm	ONE-201502	4571225302560
	200mm	※ ONE-202003	4571225302706		200mm	ONE-202002	4571225302577

※印は受注生産品です。

< 発売元 >

包装：1本毎滅菌済、EOG滅菌、5本/1箱

LEADERSHIP THROUGH IMAGINATION

**TSK** TSK LABORATORY, JAPAN

製造販売 **株式会社 タスク**

〒328-0002 栃木県栃木市惣社町1485-11

TEL 0282-27-8426 FAX 0282-27-1943

ホームページ: www.tsklab.co.jp E-mail: tsk@tsklab.co.jp

Distributed by

**クリエートメディック株式会社**

医療事業統括部 販売推進部

〒224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25

TEL: 045-943-3929 FAX: 045-943-9074