


# クリニー

## サンプルカテーテル

医療機器承認番号 16300BZZ00890000


消化管手術後の治癒促進や誤飲防止、縫合不全防止などの為には、胃液吸引や減圧をいかに効率よく行えるかがポイントになると言われております。

サンプルカテーテルは二重管構造で、吸引中エアークラップから空気が流入します。従って側孔が胃壁に吸着することを防止できますので、単管では困難な胃の持続吸引に対し効率的に行えます。

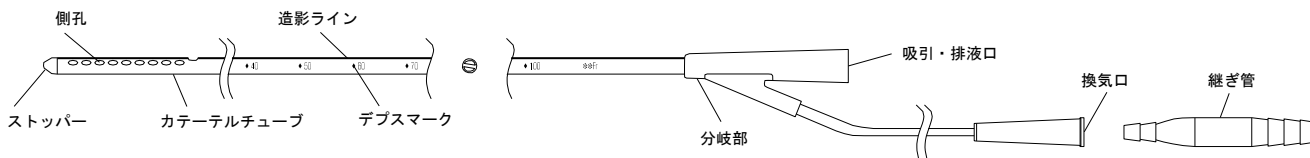

### 適 応

- 全身麻酔手術患者（特に小児、緊急手術患者、消化管機能低下患者など）の胃内容物の逆流・誤飲防止
- 消化管手術患者の術後縫合不全の防止
- 消化管出血患者の洗浄・排液

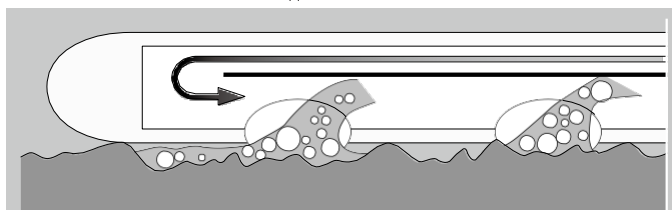

### 特長と利点

#### 1. 吸引効率のよい二重管構造

吸引中はエアークラップから空気が流入して、胃壁に過度の吸引圧がかかることを防ぎ、しかも、吸引内容物を押し流す働きをします。従って胃粘膜を損傷することもほとんどなく、効率的な吸引が行えます。

#### 2. 留置の楽なシリコン製

無味、無臭で組織刺激性の少ないカテーテルは、胃液によって硬化、変質することもほとんどなく、適度の柔軟性を保ち続けます。

#### 3. 便利なコネクター付

吸引回路への接続が簡単に行えるだけでなく、吸引休止時には、エアークラップを接続することによって、ドレナールーメンのキャップとして利用できます。

#### 4. 数字入りデプスマーク

挿入距離がひとめでわかる数字マーク入り。先端の造影チップとラインによって、留置状態が把握できます。

### 規 格

#### サンプルカテーテル

品目コード	JANコード	サイズ呼称	外径-長さ(mm)	仕様	デプスマーク(cm)
● 002 220 0120	4542187004731	12Fr	4.0-1,220	先端造影チップ 側孔 10穴	先端より 40、50、60、70、80、 90、100に 数字入りマーク
002 220 0140	4542187004748	14Fr	4.7-1,220		
002 220 0160	4542187004755	16Fr	5.3-1,220		
002 220 0180	4542187004762	18Fr	6.0-1,220		

● 印は受注生産品です

包装：5本/箱・滅菌済

- 当社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
- ご使用にあたっては、添付文書をご確認ください。



クリエートメディック株式会社

本社 横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-5-25  
ホームページ <http://www.createmedic.co.jp>